

isimoderm scars

Láminas de silicona 100%
para el tratamiento de cicatrices

REDUCE
EFICAZMENTE
CICATRICES
NUEVAS Y
ANTIGUAS

Descripción

isimoderm scars es una lámina de silicona 100% de grado médico transparente, que ayuda a reducir el tamaño, grosor, altura, y color de todos tipos de cicatrices, incluyendo cicatrices nuevas y antiguas.



Composición

Silicona 100% de grado médico transparente fabricada a partir de un elastómero de silicona, suave, adhesiva y semioclusiva. Desarrollada para el control de las cicatrices hipertróficas y queloides nuevas y antiguas.

Soluciones para cicatrices de cualquier tamaño y forma

- Cicatrices de tamaño medio
- Cicatrices largas en miembros y torso
- Cesáreas, procedimientos cardíacos, abdominoplastias




Presentación

Láminas de silicona, medidas:
29 x 3,6 cm (0,09 cm de grosor)

- Pack de 1 lámina **C.N. 165988.0**
- Pack de 3 láminas **C.N. 165989.7**

Funcionamiento:

- Las cicatrices necesitan un ambiente ideal para la curación, lo cual es logrado al tener el balance apropiado de humedad y exposición máxima al oxígeno.
- La lámina de gel de silicona **isimoderm scars** es una hoja completamente encapsulada, que significa que cubre la zona de tratamiento de la cicatriz completamente, para un tratamiento uniforme y entero de la zona.
- **isimoderm scars** es semipermeable, permitiendo que el oxígeno entre mientras que mantiene el exceso de humedad afuera, el ambiente perfecto para la curación del tejido de la cicatriz.

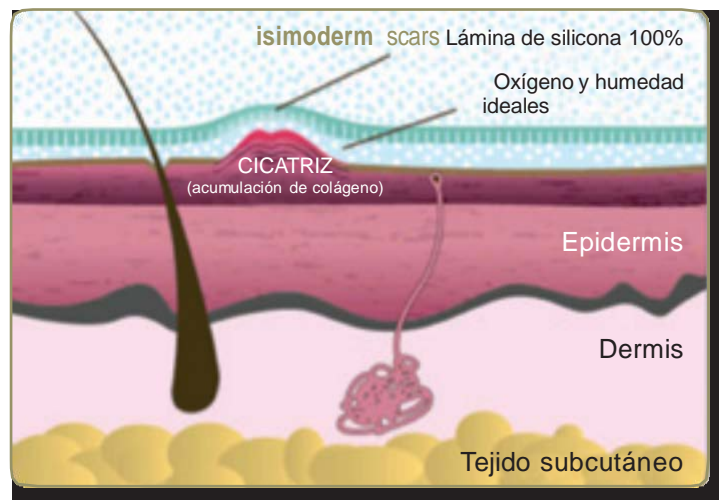

Tratamiento:

- Se debe tratar cuando ha empezado la cicatrización y se han retirado los puntos. No utilizar en heridas abiertas.
- El método más eficaz para evitar una mala cicatrización es la utilización de los apósitos de silicona de grado médico. La utilización de estos evita la formación de cordones alrededor de las cicatrices.
- El período óptimo para el tratamiento de reducción de la cicatriz es generalmente de 8 a 12 semanas.
- El periodo óptimo de utilización de las láminas de silicona es típicamente un mínimo de 12 horas por día, (preferiblemente, 24 horas al día) durante 8-12 semanas. Cortar al tamaño de la cicatriz.

Aprobaciones:

isimoderm scars, fabricadas por Biodermis han sido aprobadas por el FDA de los Estados Unidos y C.E. de Europa. Están hechas de material suave, transpirable, no invasivo, permeable, TNT (adherente en un lado solamente), semi-oclusiva y clínicamente probadas para ser seguras y efectivas como método para reducir la apariencia de las cicatrices.